

Camiseta bebé

SPUNLACE LITE



1.- Referencia Sanitaria: SBT201AA

2.- Finalidad de uso prevista: Camiseta infantil de un solo uso, abierta dorsalmente y con manga larga. Destinada a cubrir el cuerpo del paciente y actuar como barrera física que contribuye a reducir el riesgo de contaminación cruzada, al limitar la dispersión de agentes potencialmente infecciosos presentes en la piel o en el entorno inmediato, durante su estancia en entornos clínicos u hospitalarios.



- Gama SPUNLACE LITE, ligereza y absorción
- Hipoalergénica y libre de látex
- Suave y confortable
- Transpirable
- Sin desprendimiento de pelusas

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido Spunlace (30% viscosa y 70 % poliéster) con 900% capacidad de absorción	40 g/m ²	ECO

*Tolerancia ± 10%

Materia prima con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Adhesivo



Camiseta bebé

SPUNLACE LITE



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	Dimensiones		Guía Eco
		*Ancho	*Largo	
10	Pequeña	21 cm	25 cm	ECO++
11	Mediana	28 cm	27cm	ECO+

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	*Polybag 300 uds.	*300 uds.	*6.000 uds. 160 cm altura total	ECO++

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

*Logística estimada

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Libre de látex




Camiseta bebé

SPUNLACE LITE



7.- Modelo de etiquetado

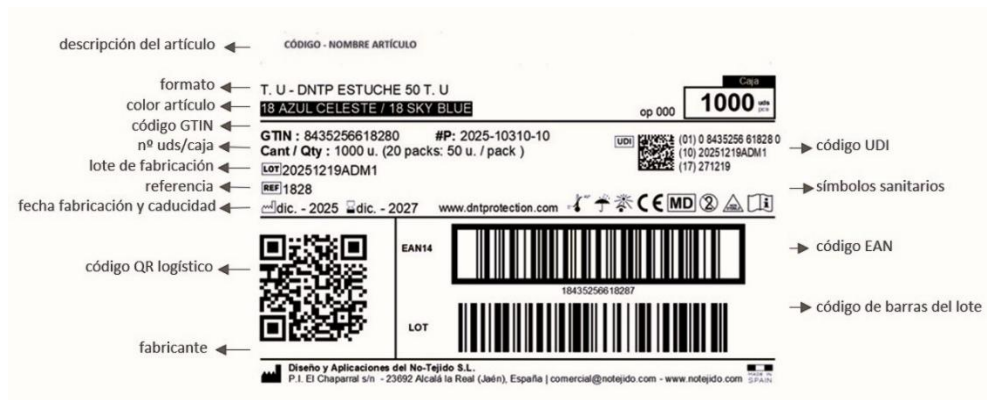

8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Introducir los brazos a través de las mangas, dejando el cierre adhesivo en la parte dorsal.
- 2.-Solapar dicho adhesivo comprobando que la camiseta queda correctamente colocada
- 3.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Utilizar solo sobre piel intacta.
- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.