

MASCARILLA QUIRÚRGICA

COMPOSICIÓN


MATERIAL (3 CAPAS)	GRAMAJE	ESTRUCTURA
NO-TEJIDO SPUNBOND 100% POLIPROPILENO	20 gr/m ²	1 capa
NO-TEJIDO MELTBLOWN 100% POLIPROPILENO	25 gr/m ²	1 capa interna filtrante
NO-TEJIDO SPUNBOND 100% POLIPROPILENO	25 gr/m ²	1 capa

COMPLEMENTOS

- Tira flexible para ajuste nasal.
- Gomas elásticas.

DIMENSIONES

- Ancho 17,5cm x Alto 9,5cm.

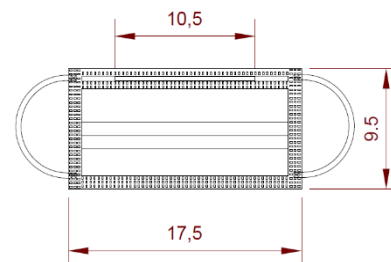

COLORES

- Blanco, verde, azul, rosa, azul marino y negro



REFERENCIA SANITARIA

- REF. 1826 (color blanco)
- REF. 1827 (color verde)
- REF. 1828 (color azul)
- REF. 1829 (color rosa)
- REF. 2081 (color azul marino)
- REF. 2082 (color negro)

EMPAQUETADO

Formato	Uds caja
Pack 50 uds	1000 uds
Pack 10 uds	800 uds

ETIQUETADO

descripción del artículo	←	MASCARILLA QUIRURG. DESECH. GOMA NO TEJIDO 18 AZUL CELESTE DISPOSABLE SURGICAL FACE MASK EARLOOP NON WOVEN 18 SKY BLUE	
formato	←	T. U - DNTP V2 TMET ESTU.50 T. U	
color artículo	←	18 AZUL CELESTE / 18 SKY BLUE	
código GTIN	←	GTIN : 8435256623116	
nº uds/caja	←	Cant / Qty : 1000 u. (20 packs: 50 u. / pack)	
referencia / lote fabricación	←	REF 1828	
fecha fabricación y caducidad	←	ene. - 2023 ene. - 2025	
			→ código UDI
			→ símbolos sanitarios
			→ código EAN
			→ código de barras del lote
código QR logístico	←		
fabricante	←	Diseño y Aplicaciones del No-Tejido S.L. P.I. El Chaparral s/n - 23692 Alcalá la Real (Jaén), España comercial@notejido.com - www.notejido.com	



MASCARILLA QUIRÚRGICA

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- Mascarilla quirúrgica **Tipo IIR** según norma UNE-EN 14683:2019 + AC:2019.
- Marcado CE.
- Fabricado en España.
- Fabricado bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.

INSTRUCCIONES DE USO

- Asegurarse de que las manos están limpias antes de colocarse la mascarilla.
- Ajustar las gomas elásticas adecuadamente.
- Ajustar la banda flexible en el puente de la nariz.
- Acomodar la mascarilla en la cara y por debajo del mentón.
- A la hora de retirar, no tocar la parte delantera ya que puede estar contaminada.
- Quitar tirando desde las gomas elásticas.
- Arrojar al recipiente de desechos y lavarse las manos.
- Producto de un solo uso.
- Tiempo de uso recomendado: 4 horas.

ALMACENAJE

- Almacenar a temperatura ambiente en lugar seco, sin exposición a luz solar directa.
- Caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

VALOR AÑADIDO

- Somos fabricantes: fabricamos en España desde la materia prima (no-tejido, meltblown) hasta el producto final. Suministro garantizado.
- Reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Apostamos por la Responsabilidad Social Empresarial.
- Nos comprometemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas.

